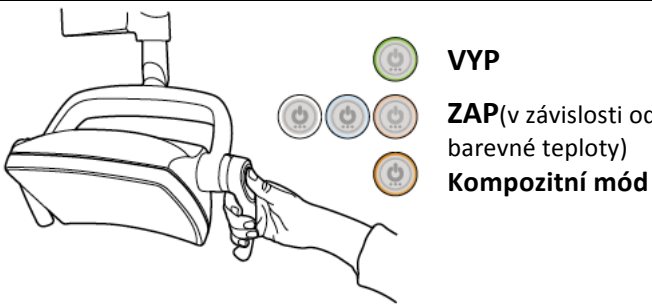


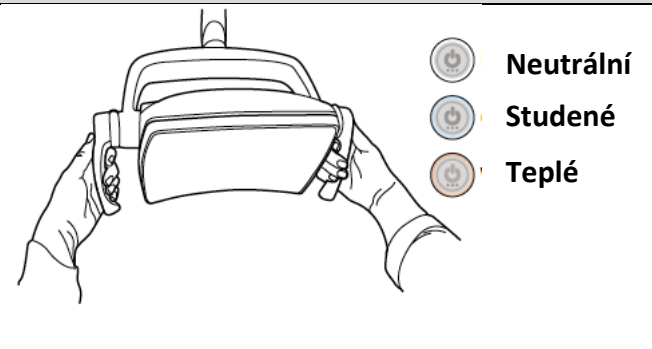
## Rychlý návod

### Ovládání ze světla

#### Jeden držák (Některé ze dvou tlačítek držáků)

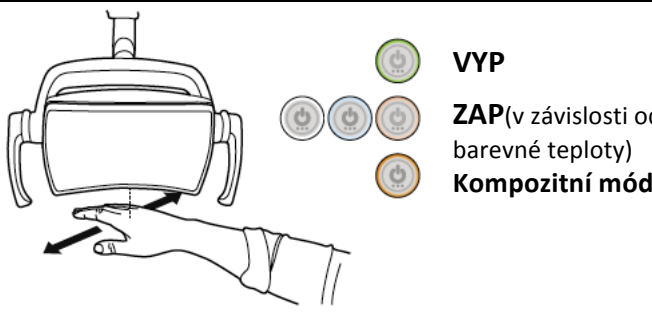
 <p><b>VYP</b> <b>ZAP</b> (v závislosti od barevné teploty) <b>Kompozitní mód</b></p>	<p><b>Krátký stisk</b>      ZAP/VYP</p> <p><b>Dlouhý stisk</b>      Zvýšení/snížení intenzity</p> <p><b>Stisknout dvakrát</b>      ZAP/VYP kompozitní mód</p>
--	---

#### Dva držáky (Obě tlačítka držáků společně)

 <p><b>Neutrální</b> <b>Studené</b> <b>Teplé</b></p>	<p><b>Dlouhý stisk</b>      Přepíná 3 barevné teploty</p>
--	---

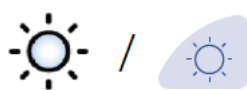

### Pomocí gesta, bezdotykově

#### Gesto ruky

 <p><b>VYP</b> <b>ZAP</b> (v závislosti od barevné teploty) <b>Kompozitní mód</b></p>	<p><b>Krátké gesto</b>      ZAP/VYP</p> <p><b>Dlouhé gesto</b>      Zvýšení/snížení intenzity</p> <p><b>Dvě gesta</b>      ZAP/VYP kompozitní mód</p>
--	---

### Ze zubní soupravy Planmeca

#### Ovládací panel

	<p><b>Krátký stisk</b>      ZAP/VYP</p> <p><b>Dlouhý stisk</b>      Zvýšení/snížení intenzity</p>
	<p><b>Krátký stisk</b>      ZAP/VYP kompozitní mód</p> <p><b>Dlouhý stisk</b>      Zvýšení/snížení intenzity v kompozitním módu</p>