












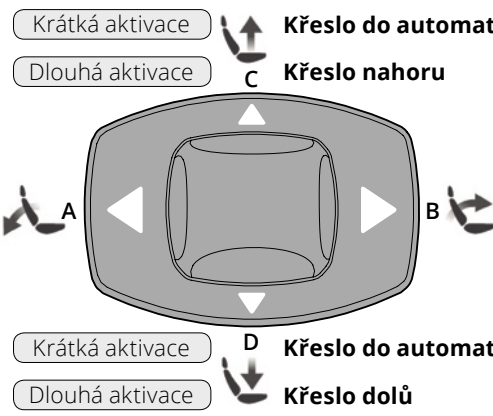









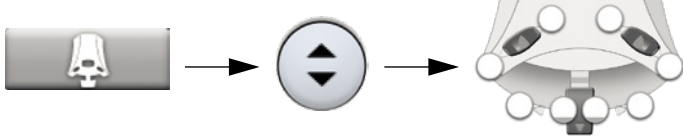













## Ovládání křesla pacienta

Ovládací panel	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.         </div> <div style="text-align: center;">  Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.         </div> </div>	
<b>Opěradlo dolů</b> <b>dokud je stisknuté</b> (ručně)	
<b>Opěradlo nahoru</b> <b>dokud je stisknuté</b> (ručně)	
<b>Křeslo dolů</b> <b>dokud je stisknuté</b> (ručně)	
<b>Křeslo nahoru</b> <b>dokud je stisknuté</b> (ručně)	
<b>Křeslo do automatické pozice</b>	 
<b>Zobrazí, která akce nožního spínače přemístí křeslo do pozice při oplachování</b>	    
Nožní spínač	
	
<div style="margin-bottom: 10px;">             Krátká aktivace  <b>Křeslo do automatické pozice A</b> </div> <div>             Dlouhá aktivace  <b>Opěradlo dolů</b> </div>	<div style="margin-bottom: 10px;">             Krátká aktivace  <b>Křeslo do automatické pozice C</b> </div> <div>             Dlouhá aktivace  <b>Křeslo nahoru</b> </div>
<div style="margin-bottom: 10px;">             Krátká aktivace  <b>Křeslo do automatické pozice B</b> </div> <div>             Dlouhá aktivace  <b>Opěradlo nahoru</b> </div>	<div style="margin-bottom: 10px;">             Krátká aktivace  <b>Křeslo do automatické pozice D</b> </div> <div>             Dlouhá aktivace  <b>Křeslo dolů</b> </div>

# Ovládání soupravy


Ovládací panel	 Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.	 Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.
<b>Plnění pohárku</b>	Krátká aktivace	
<b>Plnění pohárku dokud je stisknuté</b> (ručně)	Dlouhá aktivace	
<b>Vypláchnutí plivátka</b>	Krátká aktivace	
<b>Vypláchnutí plivátka dokud je stisknuté</b> (ručně)	Dlouhá aktivace	
<b>Funkce otevření dvířek / volání asistenta po předem naprogramovanou dobu</b>	Krátká aktivace	
<b>Funkce otevření dvířek / volání asistenta dokud je stisknuté</b> (ručně)	Dlouhá aktivace	
<b>Operační světlo Zapnuto ► Vypnuto</b>	Krátká aktivace	
<b>Intenzita operačního světla</b> (ručně)	Dlouhá aktivace	
<b>Kompozitní režim operačního světla Zapnuto ► Vypnuto</b>	Krátká aktivace	
<b>Intenzita operačního světla v kompozitním režimu</b> (ručně)	Dlouhá aktivace	
<b>Spustit požadovaný časovač</b>	 → Vyberte číslo časovače	
<b>Postup údržby</b>	 → Vyberte postup	
<b>Zobrazí naprogramované funkce nožního spínače</b>		
<b>Nožní spínač</b>		
Funkce lze programovat.		


# Ovládání nástrojů

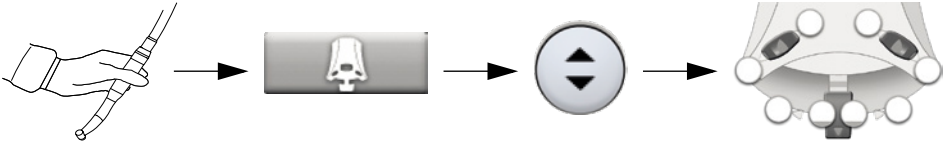Ovládací panel		Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.	Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.
<b>Chip blow - automaticky</b> Zapnuto ► Vypnuto		<b>Světlovodné osvětlení</b> Zapnuto ► Vypnuto	
<b>OZK</b> Změnit provozní režim		<b>Turbína</b> Snížení výkonu Zapnuto ► Vypnuto	
<b>Mikromotor</b> Opačná rotace Zapnuto ► Vypnuto		<b>Mikromotor</b> Limit otáček Zapnuto ► Vypnuto	
<b>Mikromotor</b> Limit momentu Zapnuto ► Vypnuto		<b>Mikromotor</b> Přepnout režim pohonu když je zapnutý limit momentu	 ►  ► 
Zobrazí naprogramované funkce nožního spínače			
<b>Nožní spínač</b> Funkce lze programovat.			


# Programování

## Ovládací panel

 Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.

 Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.

## Nastavení automatické pozice křesla pacienta

 Funkce je zapnutá.  Funkce je vypnutá.



Přesuňte křeslo do požadované pozice



Zapněte/vypněte operační světlo



Spusťte programování



Stiskněte tlačítko pozice křesla



Vyberte automatickou pozici



Potvrďte novou automatickou pozici

## Nastavení jednotky

 Funkce je zapnutá.  Funkce je vypnutá.


Většina programování se provádí tímto jednoduchým postupem:



Spusťte programování



Vyberte funkci

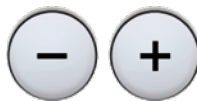

Nastavte hodnotu




Potvrďte novou hodnotu

## Nastavení nástroje

 Funkce je zapnutá.  Funkce je vypnutá.

Většina programování se provádí tímto jednoduchým postupem:

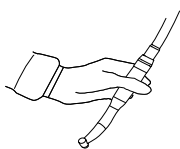


Aktivujte nástroj



Spusťte programování



Vyberte funkci

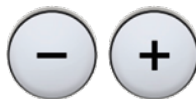

Nastavte hodnotu



Potvrďte novou hodnotu

## Funkce tlačítka Flexy



Spusťte programování



Stiskněte tlačítko držáku Flexy



Stiskněte tlačítko vedle obrázku Flexy




Vyberte funkci



Potvrďte novou funkci

## Funkce nožního spínače

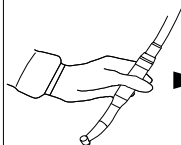

Aktivujte nástroj (nepovinné)



Spusťte programování




Stiskněte tlačítko nožního spínače



Vyberte skupinu



Vyberte režim stlačení

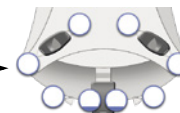

Stiskněte tlačítko vedle požadované akce





Vyberte funkci



Potvrďte novou funkci

## Nastavení času a data

 Funkce je zapnutá.  Funkce je vypnutá.




Spusťte programování




Vyberte čas a datum



Vyberte funkci

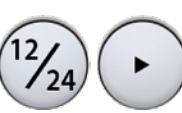

Vyberte formát

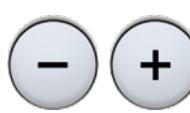

Nastavte hodnotu



Potvrďte novou hodnotu