


Ovládání křesla pacienta


Dotykový panel

Zvolte požadované nastavení uživatele

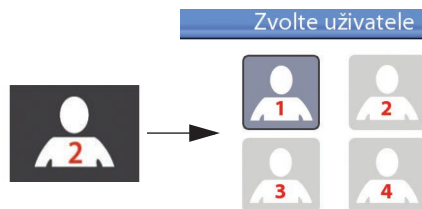





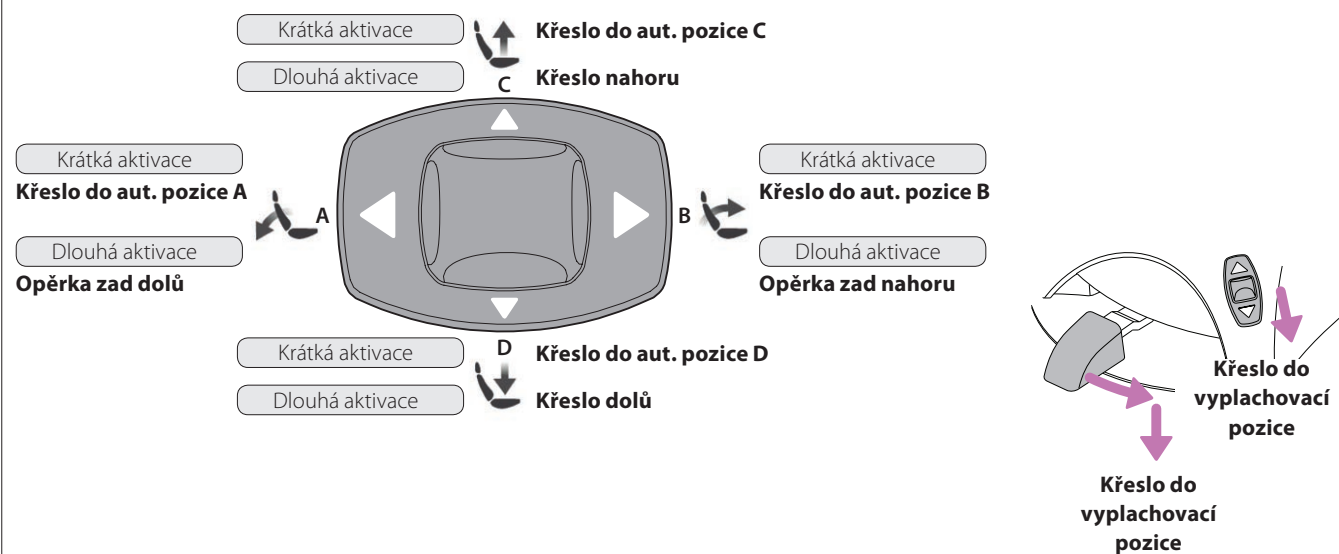




Křeslo do aut. pozice A	Krátká aktivace	
Opěrka zad dolů	Dlouhá aktivace	
Křeslo do aut. pozice B	Krátká aktivace	
Opěrka zad nahoru	Dlouhá aktivace	
Křeslo do aut. pozice C	Krátká aktivace	
Křeslo nahoru	Dlouhá aktivace	
Křeslo do aut. pozice D	Krátká aktivace	
Křeslo dolů	Dlouhá aktivace	
Křeslo do vyplachovací pozice	Krátká aktivace	Když LED nesvítí
Křeslo do původní pozice	Krátká aktivace	Když LED svítí
Křeslo pouze do vyplachovací pozice	Dlouhá aktivace	

Nožní spínač



Ovládání zubní soupravy

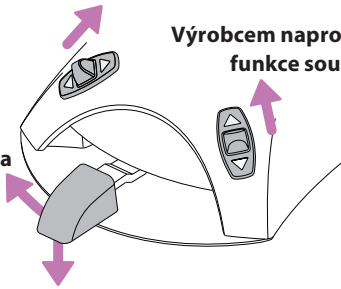Dotykový panel	
Změnit jazyk ovládání soupravy	 →  → Vyberte jazyk ze seznamu
Naplnění pohárku a oplach plivátka	Krátká aktivace 
Dokud držíte stisknuté, pohárek se plní (manuálně)	Dlouhá aktivace
Oplach plivátka	Krátká aktivace 
Výrobce naprogramovaná funkce otevření dveří a přivolání asistenta	Krátká aktivace 
Dokud držíte stisknuté, trvá otevření dveří a přivolání asistenta (manuálně)	Dlouhá aktivace
Zapnutí a vypnutí operačního světla	Krátká aktivace 
Intenzita operačního světla	Dlouhá aktivace
Start požadovaného časovače	 → Zvolte číslo časovače
Výběr procedury čištění	 → Zvolte proceduru
Nožní spínač	
Žádný nástroj není aktivován	
<p>Výrobce naprogramovaná funkce soupravy</p> <p>Výrobce naprogramovaná funkce soupravy</p> <p>Přivolání asistenta</p> 	
Krátká aktivace	Naplnění pohárku a oplach plivátka
Dlouhá aktivace	Dokud držíte stisknuté, pohárek se plní (manuálně)


Ovládání nástrojů

Dotykový panel					
Rychlost nástroje a snížení výkonu – zapnutí ► vypnutí		Mikromotor Změnit směr otáčení Zap ► Vyp		OZK Operační a pracovní režim	
Voda a vzduch ► vzduch ► bez spreje OZK Spray 1 ► Spray 2		Turbína Rychlé spuštění Zap ► Vyp		Pískovač Čistící cyklus 8 s	
Automatický profuk nástroje Zap ► Vyp		Světlo nástroje Zap ► Vyp		Pískovač Čistící cyklus 80 s	

Nožní spínač

Mikromotor anebo turbína (nástroj aktivován)

Spuštění nástroje

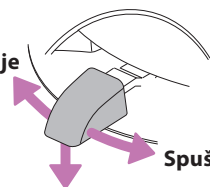

Spuštění nástroje

Krátká aktivace


Voda a vzduch ► vzduch ► bez spreje

Dlouhá aktivace

Manuální chip blow nástroje

OZK (nástroj aktivován)

Spuštění OZK

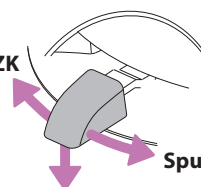


Spuštění OZK

Krátká aktivace

Spray 1 ► Spray 2

Pískovač (nástroj aktivován)

Start pískovače

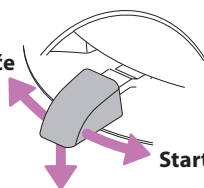


Start pískovače

Dlouhá aktivace

Krátkodobé spuštění čisticí vody

Polymerační světlo (aktivován nástroj řízený soupravou)

Start ► Stop

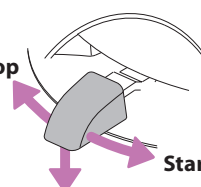


Start ► Stop

Bez funkce

Intraorální kamera (nástroj aktivován)

Zastavit ► Spustit video

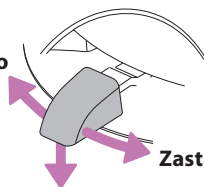


Zastavit ► Spustit video

Krátká aktivace

Uložit snímek

Výrobem naprogramovaná funkce nástroje

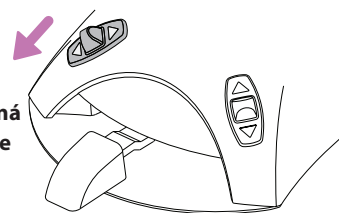

Dotykový panel, mikromotor Bien-Air MX2

Vyberte předvolbu pro mikromotor MX2



→ Vyberte požadovanou předvolbu ze seznamu

Limit otáček
Zap ► Vyp



Když je kroučící moment aktivován: přepínání mezi oběma funkcemi

Limit kroučícího momentu
Zap ► Vyp



Normální





Auto reverz



Auto forward

Ovládání motorické opěrky hlavy

Nožní spínač

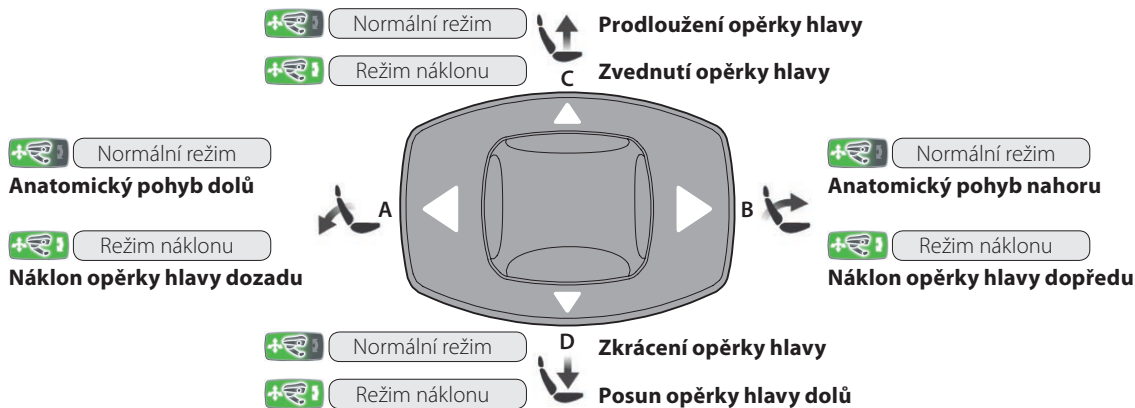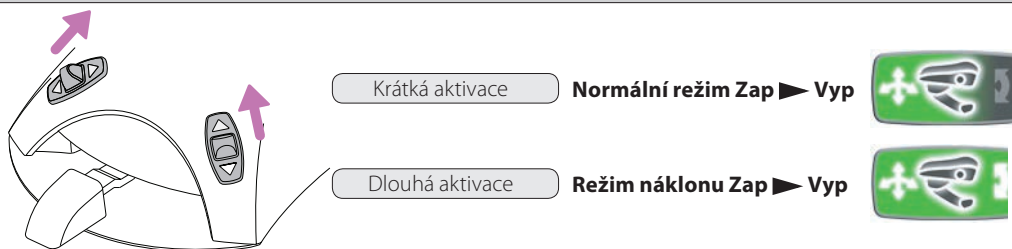


Programování

Nastavení automatické pozice křesla pacienta



Nastavení soupravy

Většina programování využívá tento jednoduchý postup:

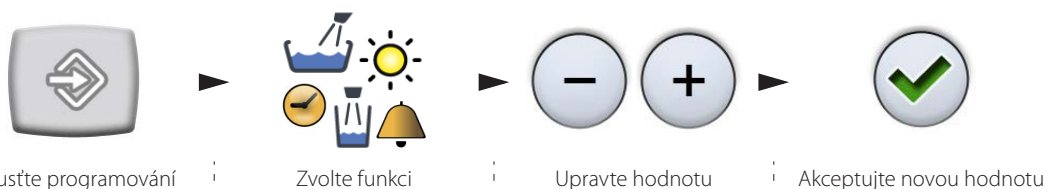

Nastavení nástroje

Většina programování využívá tento jednoduchý postup:

