



Co je třeba vědět – optimální hygiena a péče



Příprava dentálních převodových nástrojů a motorů W&H

POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Tato doporučení pro hygienu a péči platí zejména pro převodové nástroje a motory W&H.

Převodové nástroje a motory s tímto symbolem lze tepelně čistit a dezinfikovat v čistícím a dezinfekčním přístroji.

Převodové nástroje a dentální motory s tímto symbolem jsou schváleny pro sterilizaci.

Všeobecné pokyny

- > Násadec/kolénkový násadec čistíte a dezinfikujete okamžitě po každém ošetření.
- > Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice odolné proti zátřím, brýle a příp. ústní roušku).
- > Dodržujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.
- > Pro převodové nástroje a motory W&H používejte certifikované a přezkoušené dezinfekční prostředky a dodržujte příslušné dávkování a dobu působení. Použité dezinfekční prostředky nesmí obsahovat chlór.
- > Pro pohon používejte čistý a suchý vzduch.
- > Společnost W&H doporučuje použití demineralizované vody.
- > Dbejte podrobných informací uvedených na stránce wh.com

1

PŘÍPRAVA

1



příp.
dezinfekce otřením

2

ČIŠTĚNÍ / SUŠENÍ

2

Ručně



Vnitřní čištění je možné provádět sprejem schváleným společností W&H [viz stránka wh.com/hygiene]



Strojově



3

DEZINFEKCE / SUŠENÍ

3



dezinfekce otřením

* Použití ručních postupů bude v každém případě vyžadovat zajištění standardizovaného a reprodukovatelného čištění s prokázanou účinností.



Dbejte pokynů výrobce čistícího a dezinfekčního přístroje!



Vizuální kontrola

Vizuální kontrola

4

PROMAZÁNÍ

4

Ručně



Četnost péče:

- > po každém vnitřním čištění
- > před každou sterilizací
- > po 30 minutách provozu resp. alespoň 1x denně



E-motor



5

STERILIZACE

5



příp.
zabalené

135°C
55min

Společnost W&H doporučuje používat sterilizátory v souladu s normou EN 13060. Zkontrolujte, zda jsou ošetřené položky po termodezinfekci/sterilizaci suché.

6

VYJMUTÍ

6



7

ULOŽENÍ

7



Bez prachu, čistě a suché.

Bližší informace naleznete na stránce wh.com/hygiene